


Snelgids

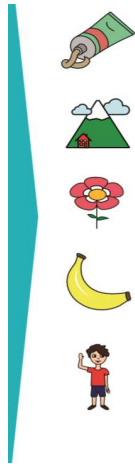

© Sig vzw

versie 2 oktober 2020

Sig vzw
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
info@sig-net.be

Test
SprakKlankOnderzoek (SKO)
Auteur van de test: Werkgroep SKO
TM Sig vzw

Handleiding en snelgids SKO
Auteurs: Joris Vanopstal en
Jean-Pierre Martens (Red.)
Eindredactie: Geert Andries

Deze snelgids en de SKO-handleiding zijn
downloadbaar op www.SKOfest.be
Vragen? info@SKOfest.be

sig
sterk in grenzen verleggen



KU LEUVEN

HoGent



Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

Test de microfoon



experiments

test microphone

1. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 1: registreer het kind



patients

add new patient

2. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 2: maak een sessie aan



patient sessions

your patient sessions

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

Laat het kind oefenen



experiments

try exercise

3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3: neem de test af



experiments

record patient session (3)

4. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 4: transcribeer



experiments

make perceptual ratings

5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5: haal resultaten op



patient sessions

progress & results (3)

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

test de microfoon

experiments

test microphone

Wat je kan doen

test microphone

try exercise

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

check perceptual ratings

back to main page

Test het volume van uw spraak en van het achtergrondlawaai. Pas eventueel de positie en/of de versterking van de microfoon aan en test opnieuw.

Zeg het volgende:
pataka, pataka, pataka, pataka, pataka

neem op

upload progress:

Achtergrondruis: ☐ Spraakvolume: ☐

Deze test controleert twee zaken:

1) lawaai opgepikt door de microfoon
(rood = te sterk, geel = nog toelaatbaar)

2) het spraakvolume
(rood = te hoog, blauw = te laag)

Van zodra de test is uitgevoerd zullen de twee grijze vierkanten onderaan het scherm verkleuren. Het ideaal is dat ze beide groen worden.

SKO - © Sigvzw - www.SKOtest.be

1. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 1= registreer een nieuw kind

patients

add new patient

Supported actions

add new patient

your patients

mail to patient

customize emoticons

back to main page

Add a new patient with the minimum number of details. You can add more details later under 'your patient'

add patient

clear form

Patient profile

surname (*): Peeters

first name (*): Jan

date of birth: year = 2016 month = 04 day = 02

1

2

Patient "Peeters Jan" is successfully added.

SKO - © Sigvzw - www.SKOtest.be

2

2. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 2= maak een sessie aan

patient sessions

your patient sessions

SKO - © Sig zvw - www.SKOTest.be

your patient sessions Select a template or session:

your session templates

Session properties

date of creation (yyyy-mm-dd):

description (maximum 32 characters):

selected patient:

selected exercises:

add an exercise:

number of times to do (default 1):

1

templates for quickly creating new sessions ----

SKObasis, Vlaanderen, SIG, SIG

---- already defined sessions ----

2017-11-14, M29190, YVA, 21

2019-01-27, Modaal, Jan

2019-01-08, Modaal, Jan

2018-12-31, Modaal, Jan

2018-02-12, Name, Louise, NL

your patient sessions Select a template or session:

your session templates

Session properties

date of creation (yyyy-mm-dd):

description (maximum 32 characters):

selected patient:

selected exercises:

add an exercise:

number of times to do (default 1):

2

SKObasis, Vlaanderen, SIG, SIG

add/update

clear form

2019-09-17

spraakklankonderzoek

Peeters, Jan

SKObasis.reeks1[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.reeks2[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.reeks3[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.reeks4[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.reeks5[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.reeks6[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis.imateer[Vlaanderen, SIG, SIG]

1

Home icon

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

Laat het kind oefenen

experiments

try exercise

SKO - © Sig zvw - www.SKOTest.be

test microphone

Exercise to select:

try exercise

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

check perceptual ratings

back to main page

1

sv_test[admin]

cvv_test[admin]

lange klinkers[admin]

klankenwoorden[admin]

de auto[admin]

papa marloes[admin]

80dappere[admin]

vijervrouw[admin]

SMIR_test[admin]

AMIR_test[admin]

DIA_A[admin]

DIA_B[admin]

DIA_C[admin]

DIA_D0[admin]

AVQI_test[admin]

SKObasis introef[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis oefen[Vlaanderen, SIG, SIG]

SKObasis reeks [Vlaanderen, SIG, SIG]

try exercise

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

check perceptual ratings

back to main page

2

neem op

upload progress:

verlaat oefening

KLIK HIER VOOR EXTRA HULP

Dit zijn oefenitems om de testpersoon vertrouwd te maken met de test.

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan laten benoemen
- 2) laten benoemen na aanvalzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:
bloem, hond, gitaar, paard

Home icon

3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

try exercise

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

check perceptual ratings

back to main page



KLIK HIER VOOR EXTRA HULP

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan laten benoemen
- 2) laten benoemen na aanvulzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:

appel, arm, bakker, banaan, bank, berg, blokken, bril, deur, drinken, fiets, fles

neem op
toon vorige
verlaat oefening

upload progress:


SKO - © Sig-zvw - www.SKOfest.be



3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

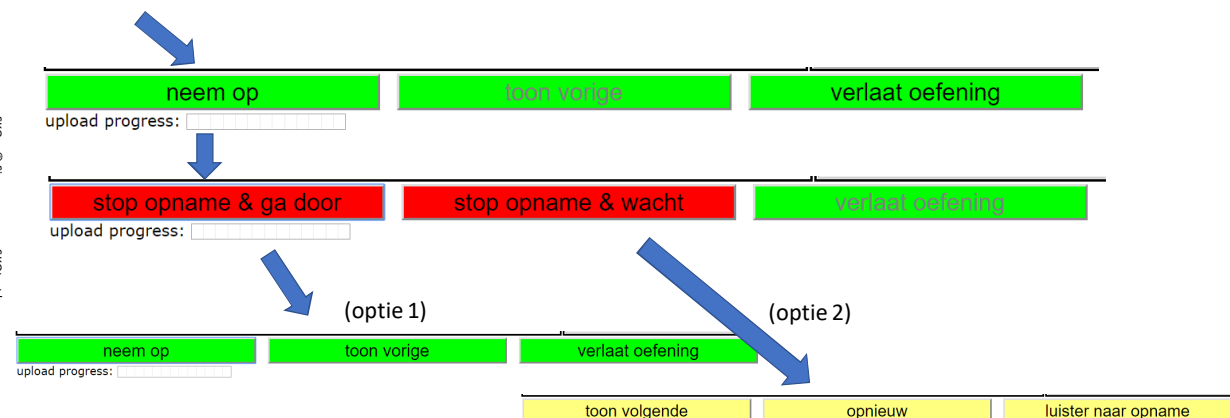

SKO - © Sig-zvw - www.SKOfest.be



3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

De reeks werd afgewerkt, verlaat deze oefening en start een nieuwe reeks. Er zijn 6 benoemreeksen en 1 nazegreeks.

test microphone Je hebt de oefening met succes voltooid. Je kan nu doorgaan naar de volgende oefening.

try exercise

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

check perceptual ratings

back to main page

SKO - © Sig zw - www.SKOtest.be



4. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 4= transcribeer

experiments

make perceptual ratings

select a session

Supported actions

Rate a set of recordings according to the instructions you received from the therapist. There are three types of ratings to distinguish:

- 1) a global rating for the ensemble of recordings (mark a square).
- 2) a choice out of options displayed for a selected recording (mark an option).
- 3) a transcription of the selected recording (edit text field).

EXERCISE UNDER EVALUATION: SKObasis.reeks1

SELECT THE SPEECH TASK RECORDING YOU WANT TO LISTEN TO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FILL IN WHAT YOU HEARD IN THE SELECTED SPEECH TASK RECORDING

get explanation

former exercise stop rating next exercise

phoneme_list

SELECT THE SPEECH TASK RECORDING YOU WANT TO LISTEN TO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FILL IN WHAT YOU HEARD IN THE SELECTED SPEECH TASK RECORDING

get explanation

/bAnk

former exercise stop rating next exercise

phoneme_list

SKO - © Sig zw - www.SKOtest.be



Vergeet niet af te sluiten

5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

patient sessions

progress & results

Supported actions

Survey of your patient sessions (organized per active patient).
Click on a session button to consult the individual sessions of a patient.

- your patient sessions
- your session templates
- progress & results**
- end active sessions
- assign raters
- back to main page

patient name	nr of sessions defined / completed	
Caro Lientje	1 / 1	sessions
juni test	1 / 0	sessions
M29190 YVA	1 / 1	sessions
Modaal Jan	0 / 0	
More Thomas	1 / 0	sessions
Name Louise	1 / 0	sessions
Name No	2 / 0	sessions
Peeters Jan	1 / 1	sessions
Pek Pietje	1 / 1	sessions
september test	2 / 1	sessions
Simpson Bart	5 / 3	sessions

Survey of the patient sessions created for Simpson Bart.

From here you can consult detailed results (from automatic analyses, perceptual ratings and self-evaluations) for a particular session.

patient session + description	session cycles (due / done)	session analyses (due / done)	session ratings (open / busy / done)
2019-09-10 (spraakklankonderzoek)	1 / 0	0 / 0	0 / 0 / 0
2019-09-09 (spraakklankonderzoek)	1 / 1	0 / 0	0 / 0 / 1 more
2019-09-08 (spraakklankonderzoek)	1 / 0	0 / 0	0 / 0 / 0
2018-01-09 (met nieuwe microfoon)	1 / 1	0 / 0	0 / 1 / 0 more
2017-11-19 ()	1 / 1	0 / 0	1 / 0 / 0 more

1

2

Perceptual ratings obtained for a particular session.

To print the report: put the cursor in this window, right click on the mouse and select the PRINT option (use landscape view).

Simpson Bart (session: 2019-09-09 spraakklankonderzoek)

Session-wide analysis of utterance level ratings

[one level back](#)

evaluator + delivery date	perceptual task	result
VANOPSTAL Joris, 2019-09-09	SKO	Task: spraakklankonderzoek globale analyse van consonanten (72 woorden, leeftijdsgroep 6) PC = 99.2 (pc 77.1) PCS = 9.4 (pc 58.3), PCD = 0.4 (pc 47.1) PCD = 0.8 (pc 57.5), PCA = 0.8 (pc 34.6) PPP-SOB = 0.1 (pc 62.5), PPP-DVL = 0.3 (pc 45.4) fonologische analyse van substituties (voorkomen > 1, pc < 58) fonologische analyse van syllabestructuur (voorkomen > 1, pc < 58) fonetische analyse (aantal fouten > 1, foutpercentage > 28)

3

SKO - © sigzvw - www.SKOtest.be



5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

patient sessions

progress & results

Perceptual ratings obtained for a particular session.

To print the report: put the cursor in this window, right click on the mouse and select the PRINT option (use landscape view).

Simpson Bart (session: 2019-09-09 spraakklankonderzoek)

Session-wide analysis of utterance level ratings

[one level back](#)

evaluator + delivery date	perceptual task	result
VANOPSTAL Joris, 2019-09-09	SKO	Task: spraakklankonderzoek globale analyse van consonanten (72 woorden, leeftijdsgroep 6) PC = 99.2 (pc 77.1) PCS = 9.4 (pc 58.3), PCD = 0.4 (pc 47.1) PCD = 0.8 (pc 57.5), PCA = 0.8 (pc 34.6) PPP-SOB = 0.1 (pc 62.5), PPP-DVL = 0.3 (pc 45.4) fonologische analyse van substituties (voorkomen > 1, pc < 58) fonologische analyse van syllabestructuur (voorkomen > 1, pc < 58) fonetische analyse (aantal fouten > 1, foutpercentage > 28)

[Opslaan als](#)

Deze pc > Documenten > ao > ASISTO > test201909

Organiseren Nieuwe map

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
SKO519_SKO	9/09/2019 15:58	Rich Text Format	2.26
SKO521_SKO	10/09/2019 10:07	Rich Text Format	2.27

Bestandsnaam: SKO522_SKO

Opslaan als: Rich Text Format

[Opslaan](#) [Annuleren](#)

SKO - © sigzvw - www.SKOtest.be



5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

[illegible]