


Snelgids

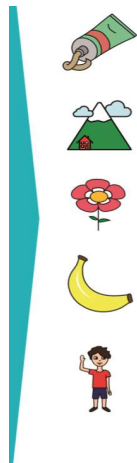

© Sig vzw

versie september 2022

Sig vzw
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
info@sig-net.be

Test

SpraakKlankOnderzoek (SKO)
Auteur van de test: Werkgroep SKO
TM Sig vzw

Handleiding en snelgids SKO

Auteurs: Joris Vanopstal en
Jean-Pierre Martens (Red.)
Eindredactie: Geert Andries

Deze snelgids en de SKO-handleiding zijn
downloadbaar op www.SKOTest.be
Vragen? info@SKOTest.be



1. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 1: registreer het kind



patients

add new patient

2. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 2: maak een sessie aan



patient sessions

patient's sessions

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF Test de microfoon



experiments

test microphone

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF Laat het kind oefenen



experiments

try exercise

3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3: neem de test af



experiments

record patient session

4. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 4: transcribeer



experiments

make perceptual ratings

5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5: haal resultaten op



experiments

show results by automatic

1. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 1= registreer een nieuw kind

patients

add new patient

What you can do 

You can add a new patient by entering a minimum number of details (only those marked by a star are obligatory) and by clicking on 'ADD'. If you need more details go to 'your active patients' to get a more elaborate form.

add new patient

your active patients

your archived patients

your patient groups

mail to patient

customize emoticons

Patient profile

last name (*): Peeters

first name (*): Jan

date of birth: year = 2016 month = 04 day = 01

1

Patient "Peeters Jan" is successfully added.

2

patient sessions

experiments

main page

add patient

clear form



SKO - © Sig.vzw - www.skoest.be

2. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 2= maak een sessie aan

patient sessions

select/change patient

define/check sessions

assign raters to sessions

patient's results

patient's progress

define session prototypes

define/check sessions

Select session to start from:

Select session prototype to start from:

PATIENT SESSION FORM

name of session (yyyy-mm-dd): 2022-06-02

description (max. 32 characters): spraakkijkonderzoek

selected: martenis.els

exercise sequence:

add an exercise:

number of times to do (default 1):

1

2

experiments

patients

exercises

main page

add

update

delete

clear form



SKO - © Sig.vzw - www.skoest.be

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

Test de microfoon

experiments

test microphone

select patient session

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

select human rater

check perceptual ratings

show ratings per exercise

show results by automatic

test microphone

try exercise

patient sessions

main page

Zeg het volgende:
pataka, pataka, pataka, pataka, pataka

start opname

upload progress:

Achtergrondruis: ☐

Spraakvolume: ☐

Deze test controleert twee zaken:

1) lawaai opgepikt door de microfoon
(rood = te sterk, geel = nog net toelaatbaar)

2) het spraakvolume
(rood = te hoog, blauw = te laag)

Van zodra de test is uitgevoerd zullen de twee grijze vierkanten onderaan het scherm verkleuren. Het ideaal is dat ze beide groen worden.

SKO – © Sig vzw – www.SKOtest.be

Neem het SKO-basisonderzoek af: VOORAF

Laat het kind oefenen

experiments

try exercise

select patient session

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

select human rater

check perceptual ratings

show ratings per exercise

show results per automatic

test microphone

try exercise


patient sessions

main page

Exercise to select:

testcentral
testfinal
prenten
marbles
klankenwoorden[admin]
SKObasis_reeks1[SIG_vzw.gd]
SKObasis_reeks2[SIG_vzw.gd]
SKObasis_reeks3[SIG_vzw.gd]
SKObasis_reeks4[SIG_vzw.gd]
de_auto[admin]
lange_klinkend[admin]
SKObasis_reeks5[SIG_vzw.gd]
SKObasis_reeks6[SIG_vzw.gd]
SKObasis_reeks7[SIG_vzw.gd]
AVQL_test[admin]
ANR_test[admin]
SAR_test[admin]
papa_marbles[admin]
60dappen[admin]

1

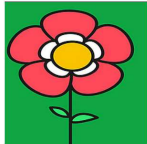




start opname

upload progress:

[KLIK HIER VOOR EXTRA HULP](#)

Dit zijn oefenitems om de testpersoon vertrouwd te maken met de test.

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan laten benoemen
- 2) laten benoemen na aanvalzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:
bloem, hond, gitaar, paard

toon voorje

verlaat oefening

2

→



SKO – © Sig vzw – www.SKOfest.be

3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af


experiments

record patient session



- select patient session
- record patient session
- listen to responses
- make perceptual ratings
- select human rater
- check perceptual ratings
- show ratings exercise
- show results by aut
- test microphone

■■■■■■■■■■

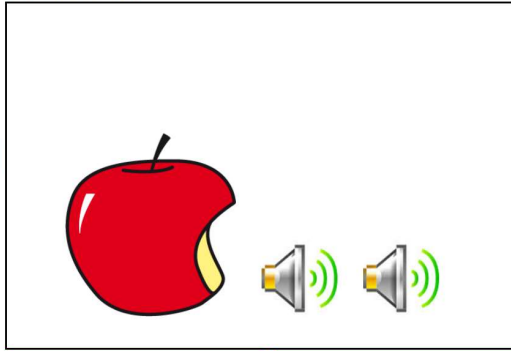

[KLIK HIER VOOR EXTRA HULP](#)

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan laten benoemen
- 2) laten benoemen na aanvulzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:

appel, arm, bakker, banaan, bank, berg, blokken, bril, deur, drinken, fiets, fles

start opname

toon vorige

verlaat oefening

upload progress:

SKO - © Sig vzw - www.SKOfest.be



3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session



start opname

toon vorige

verlaat oefening

upload progress:



stop opname & ga door

stop opname & wacht

verlaat oefening

upload progress:



(optie 1)

start opname

toon vorige

verlaat oefening

upload progress:



(optie 2)

toon volgende

opnieuw

luister naar opname

SKO - © Sig vzw - www.SKOfest.be




3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

■■■■■■■■■■

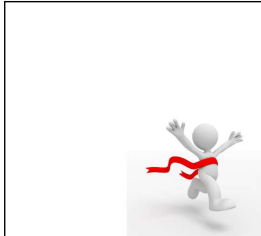

[KLIK HIER VOOR EXTRA HULP](#)

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan 1x benoemen
- 2) 1x benoemen na aanvulzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:
frietjes, garage, geweer, giraf, glas,
groot, heks, helm, hemd, jongen, kaars,
kabouter

start opname

toon vorige

verlaat oefening

upload progress:

Je hebt de oefening met succes voltooid. Je kan nu doorgaan naar de volgende oefening.

De reeks werd afgewerkt, verlaat deze oefening en start een nieuwe reeks. Er zijn 6 benoemreeksen en 1 nazegreeks.




3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

Je kan nu oefening SKOBASIS.IMITEER van sessie 2022-03-22 afwerken

■■■■

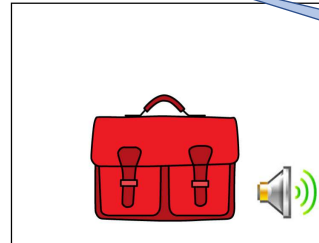

[KLIK HIER VOOR EXTRA HULP](#)

Speel het woord af en laat het nazeggen.

De verwachte woorden zijn:
boek, lade, diertuin,
pannenkoeken

start opname

toon vorige

verlaat oefening

upload progress:

Nieuwe instructie bij laatste (7^{de}) oefening: 'nazeggen'

Bij de volgende prentjes moet je eerst goed luisteren en dan het woord nazeggen.



3. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 3= neem de test af

experiments

record patient session

XXXXXXXXXXXX

[KLIK HIER VOOR EXTRA HULP](#)

Probeer volgende uitlokkingswijzen (zie handleiding) tot de prent correct benoemd is:

- 1) spontaan laten benoemen
- 2) laten benoemen na aanvulzin
- 3) uitgesteld laten nazeggen
- 4) gewoon laten nazeggen

De verwachte woorden zijn:
frietjes, garage, geweer, giraf, glas, groot, heks, helm, hemd, jongen, kaars, kabouter

upload progress:

start oefening toon vorige verlaat oefening

De 7 reeksen werden afgewerkt. Verlaat deze oefening en start de transcriptie.

Je hebt de oefening met succes voltooid.
Je hebt tevens de oefeningensessie voltooid.

SKO - © Sig.vzw - www.SKOtest.be



4. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 4= transcribeer

experiments

make perceptual ratings

What you can do

- select next session
- record patient session
- listen to responses
- make perceptual ratings
- select human rater
- check perceptual ratings

Rate a set of recordings according to the instructions you received from the therapist. There are three types of ratings to distinguish:

- 1) a global rating for the ensemble of recordings (mark a square).
- 2) a choice out of options displayed for a selected recording (mark an option).
- 3) a transcription of the selected recording (edit text field).

EXERCISE UNDER EVALUATION: SKObasis.reeks1

SELECT THE SPEECH TASK RECORDING YOU WANT TO LISTEN TO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FILL IN WHAT YOU HEARD IN THE SELECTED SPEECH TASK RECORDING

get explanation

former exercise stop rating next exercise phoneme_list

SELECT THE SPEECH TASK RECORDING YOU WANT TO LISTEN TO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FILL IN WHAT YOU HEARD IN THE SELECTED SPEECH TASK RECORDING

get explanation

/bAnk

former exercise stop rating next exercise phoneme_list

Vergeet niet af te sluiten

SKO - © Sig.vzw - www.SKOtest.be



5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

experiments

show results by automatic

- listen to responses
- make perceptual ratings
- select human rater
- check perceptual ratings
- show ratings per exercise
- show results by automatic**
- test microphone
- try exercise
- patient sessions
- main page

Automatic analysis results for this session

cycle	analysis method	emoji	analysis result
1	SKO (spraakwaliteit)	😊	get the report (from ratings of yourself, 2022-06-25) Fonologische analyse (72 woorden, leeftijdsgroep 3) 1) globale analyse PFP = 0.7 (pc 63) 2) analyse per substitutieproces (enkel indien pc < 50) lateralisatie = 1.5% (pc 22) 3) analyse per syllabeconstructieproces (enkel indien pc < 50) clusterreductie = 23.1% (pc 11) Fonetische analyse van de consonanten (72 woorden, leeftijdsgroep 3) 1) globale analyse PCS = 92.1 (pc 68) PCS = 3.0 (pc 70), PCD = 0.0 (pc 87) PCO = 5.2 (pc 18), PCA = 0.4 (pc 25) 2) analyse per fonem (enkel indien aantal fouten > 1 en procent fouten > 20) r: aantal = 25, Pom = 12.0, Psub = 18.2, Pdis = 0.0 v: aantal = 6, Pom = 0.0, Psub = 33.3, Pdis = 0.0


SKO - © Sig.vzw - www.SKOtest.be



5. Neem het SKO-basisonderzoek af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

experiments

show results by automatic

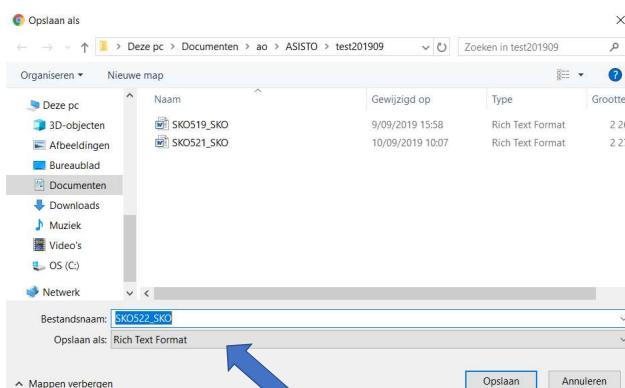

SKO - © Sig.vzw - www.SKOtest.be



© 2004 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

